

لیست راهنماهای ادرار 24 ساعته



شماره: LA-LI-0005-00

تاریخ: 1403.08.01

	آنالیت	دمای اتاق	یخچال	فریزر	بدون نگهدارنده	HCL 6NL 10-15ml	Boric Acid 10 gr	Acid Acetic 50% 25ml	سایر موارد
1	Albumin/Micro Albumin	≥ 7 روز	≥ 14 روز	≥ 12 هفته	(داخل آزمایشگاه)		★		
2	Aldosterone	≥ 4 ساعت	≥ 3 روز	≥ 30 روز		★	★		
3	Aminoacids		≥ 1 روز	≥ 30 روز	★				
4	Aminolevulonic Acid (ALA)		≥ 4 روز	≥ 3 ماه		★	★		در جای تاریک، دور از نور نگهداری شود
5	Amylase	≥ 2 روز	≥ 10 روز		★				تنظیم $\text{PH} < 7$
6	Bence Jones Protein	≥ 72 ساعت	$\geq 7-10$ روز	≥ 5 روز			★		
7	Calcium			≥ 3 هفته		★			
8	Ceroloplasmin	≥ 1 روز	≥ 7 روز	≥ 30 روز			★		
9	Chloride		≥ 14 روز				★		
10	Citrate	≥ 8 ساعت	≥ 1 هفته	≥ 6 ماه		★			
11	Cortisol		≥ 6 ماه	≥ 6 ماه			★ (ترجیحا)	★	
12	Copper	≥ 14 روز	≥ 14 روز (ترجیحا)	≥ 14 روز	★	★			ر صورتیکه در کمتر از 2 هفته انجام شود، نیاز به نگهدارنده ندارد.

لیست راهنماهای ادرار 24 ساعته



شماره: LA-LI-0005-00

تاریخ: 1403.08.01

آنالیت	دمای اتاق	یخچال	فریزر	بدون نگهدارنده	HCL 6NL 10-15ml	Boric Acid 10 gr	Acid Acetic 50% 25ml	سایر موارد
Creatinine	≥ 2 روز ≥ 3 روز (با نگهدارنده)	≥ 6 روز ≥ 8 روز (با نگهدارنده)	≥ 6 ماه ≥ 1 هفته (با نگهدارنده)	*	*	*		
Cystine			≥ 30 روز		*			
C-Peptide	≥ 4 ساعت	≥ 1 روز	≥ 30 روز	*				
Dopamine			≥ 4 روز	*				
Electrophoresis Protein	≥ 72 ساعت	≥ 14 روز	≥ 5 روز	*				
Epinephrine		≥ 7 روز	≥ 1 ماه		*		*	
Glucose		≥ 2 ساعت	≥ 2 روز			*	*	
5HIAA		≥ 56 روز			*	*		دور از نور قرار گیرد
Homocystein		≥ 3 روز	≥ 3 روز	*				
HydroxyProline			≥ 4 روز	*				نمونه فریز و در تاریکی باشد
17ketosteroid			≥ 5 روز		*	*	*	
Metanephrine			≥ 6 ماه		*			دور از نور قرار گیرد
Mg	≥ 3 روز	≥ 3 روز	≥ 1 سال		*			تنظیم PH تا 1

لیست راهنماهای ادرار 24 ساعته



شماره: LA-LI-0005-00

تاریخ: 1403.08.01

آنالیت	دمای اتاق	یخچال	فریزر	بدون نگهدارنده	HCL 6NL 10-15ml	Boric Acid 10 gr	Acid Acetic 50% 25ml	سایر موارد
Myoglobin		≥ 7 روز	≥ 1 ماه	★				
Norepinephrine		≥ 7 روز	≥ 3 ماه		★		★	
Oxalate		≥ 7 روز						تنظیم PH در محدوده 5-7
Phosphorus		≥ 6 ماه			★			تنظیم PH > 3
Potassium	≥ 7 روز	≥ 14 روز (ترجیحا)	≥ 14 روز	★ (ترجیحا)	★	★		
Porphirine		≥ 7 روز		★				دور از نور قرار گیرد
Proline			≥ 1 ماه	★				
Protein total	≥ 1 روز	≥ 7 روز	≥ 1 ماه	★				
PKU			≥ 1 ماه	★				
Sodium	≥ 7 روز	≥ 14 روز (ترجیحا)	≥ 14 روز	★ (ترجیحا)	★	★		
Urate								
Urea/BUN	≥ 2 روز	≥ 7 روز	≥ 1 سال	★				
Uric Acid	≥ 4 روز (در صورت استفاده از (NAOH			★ در اسرع وقت				ادرار قلیایی با NAOH PH در محدوده < 8 نگهداشته شود. نمونه در یخچال نگهداری نشود



لیست راهنماهای ادرار 24 ساعته

شماره: LA-LI-0005-00

تاریخ: 1403.08.01

VMA	≥ 1 روز (بدون نگهدارنده)	≥ 5 روز	≥ 1 ماه		★		تنظیم PH تا 2-1
-----	--------------------------------	--------------	--------------	--	---	--	-----------------

نمونه هایی که در فریزر نگهداری می شوند فقط یک بار می توان دفریز کرد. علامت ستاره (*) زیر هر ماده نگهدارنده نشانگر مناسب بودن آن ماده برای نگهداری ادرار 24 ساعته است

منابع:

(1) بروشور کیت

(2) سایت Mayoclinic laboratories

(3) سایت ARUP

کولایف

آزمایشگاه های یکپارچه پزشکی